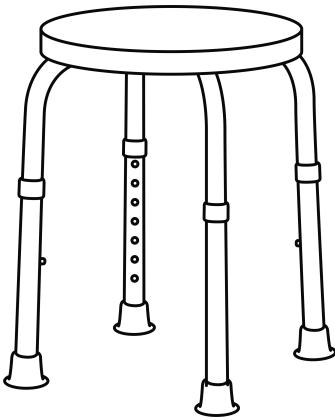




TITANIUM CH-01 Арт. 34000

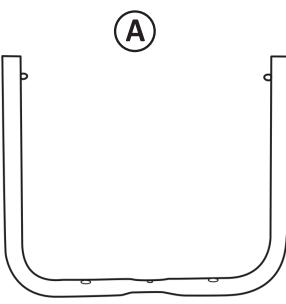
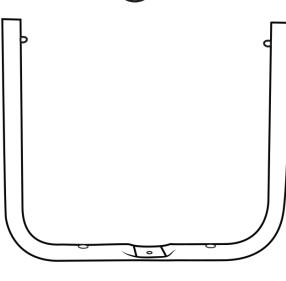
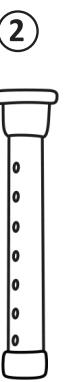
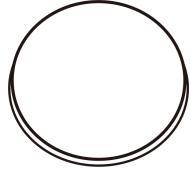
СТУЛ ДЛЯ ВАННОЙ

Руководство пользователя



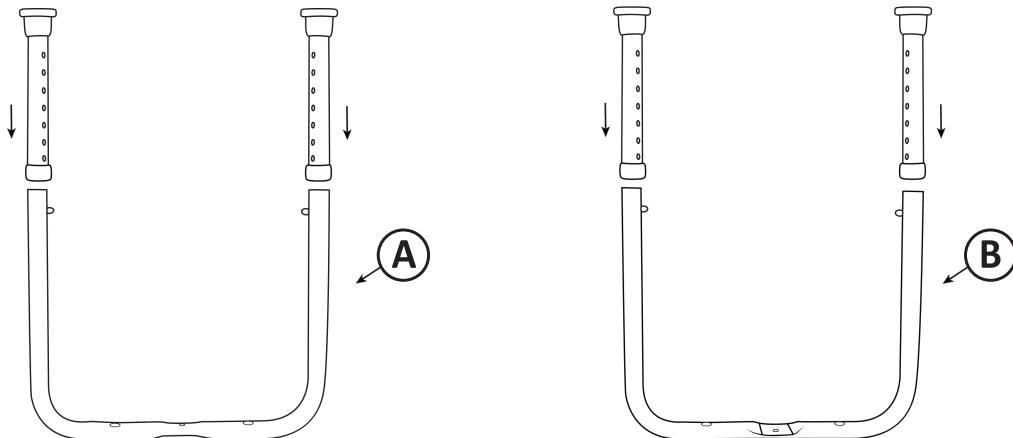
- Перед началом сборки убедитесь, что все детали и крепеж присутствуют и соответствуют списку в инструкции.
- Убедитесь, что нет повреждений на элементах.
- Ознакомьтесь со всей инструкцией до начала сборки — это поможет избежать ошибок.
- Следуйте шагам строго по порядку, не пропуская этапов.
- Собирайте и устанавливайте изделие на ровной поверхности.
- Обеспечьте достаточное пространство для комфортной работы.
- Не применяйте чрезмерную силу — это может повредить изделие.

ДЕТАЛИ СТУЛА ДЛЯ ВАННН

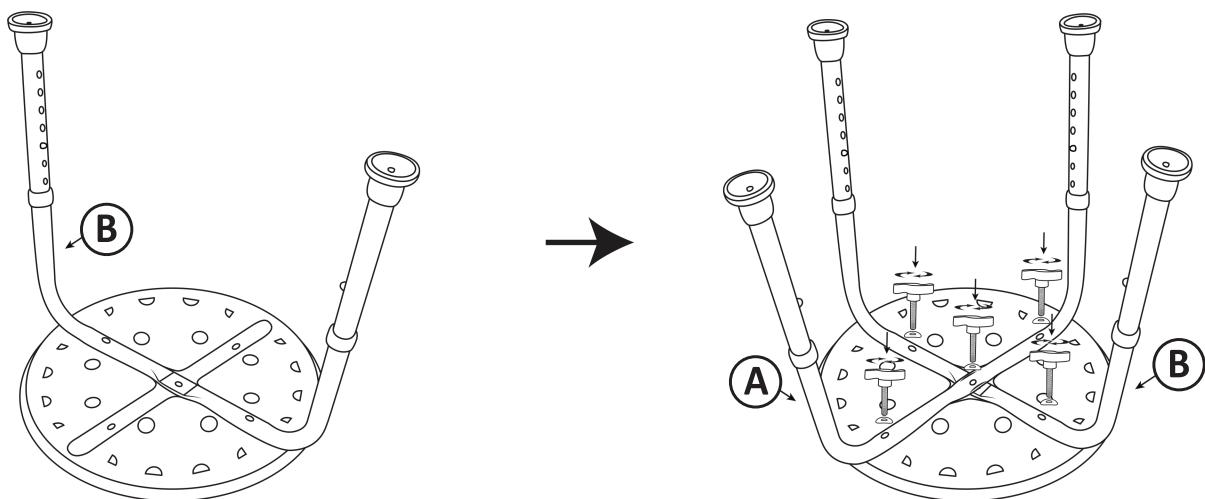
 A	 B	Основной каркас 2 шт	
		 2	Опорная ножка 4 шт
		 3	Винт 5 шт
 1	 4	Сиденье 1 шт	Шайба 5 шт

ПОЭТАПНАЯ СХЕМА СБОРКИ

1. Соедините основной каркас с опорными ножками и отрегулируйте на одинаковую высоту.



2. Зафиксируйте основной каркас на сиденье с помощью винтов и шайб.



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Стул для ванн предназначен для комфортного и безопасного купания людей с ограниченными возможностями, пожилых людей, беременных женщин, а также тех, кто находится на реабилитации.

- Максимальная нагрузка на стул 135 кг
- Чистку поверхностей изделия производите влажной тканью. При необходимости используйте специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
- Не используйте абразивные средства, растворители, ацетон, спирт и другие агрессивные химикаты.
- Периодически проверяйте и подтягивайте винты и крепления.

Изготовитель: Ханчжоу Кайфань Е-комерс Компани Лимитед

Адрес: Компрехенсив Билдинг, Сауф Индастриал Фанкшионал Ареа, Мэйчэн Таун, Цзянъэд Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «ТД Компания Деффендер»

Адрес: 127030 г. Москва, вн.терг. муниципальный округ Тверской, ул. Сущёвская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение 111, комната 3, офис 63.

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012).

Гарантия на изделие составляет 6 месяцев с даты покупки при условии соблюдения правил сборки, эксплуатации и ухода.

Дата изготовления (месяц, года) и номер партии указаны на упаковке

ЕАС